


VEILIGHEIDINSTRUCTIES VOOR ZUURSTOF

7 VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

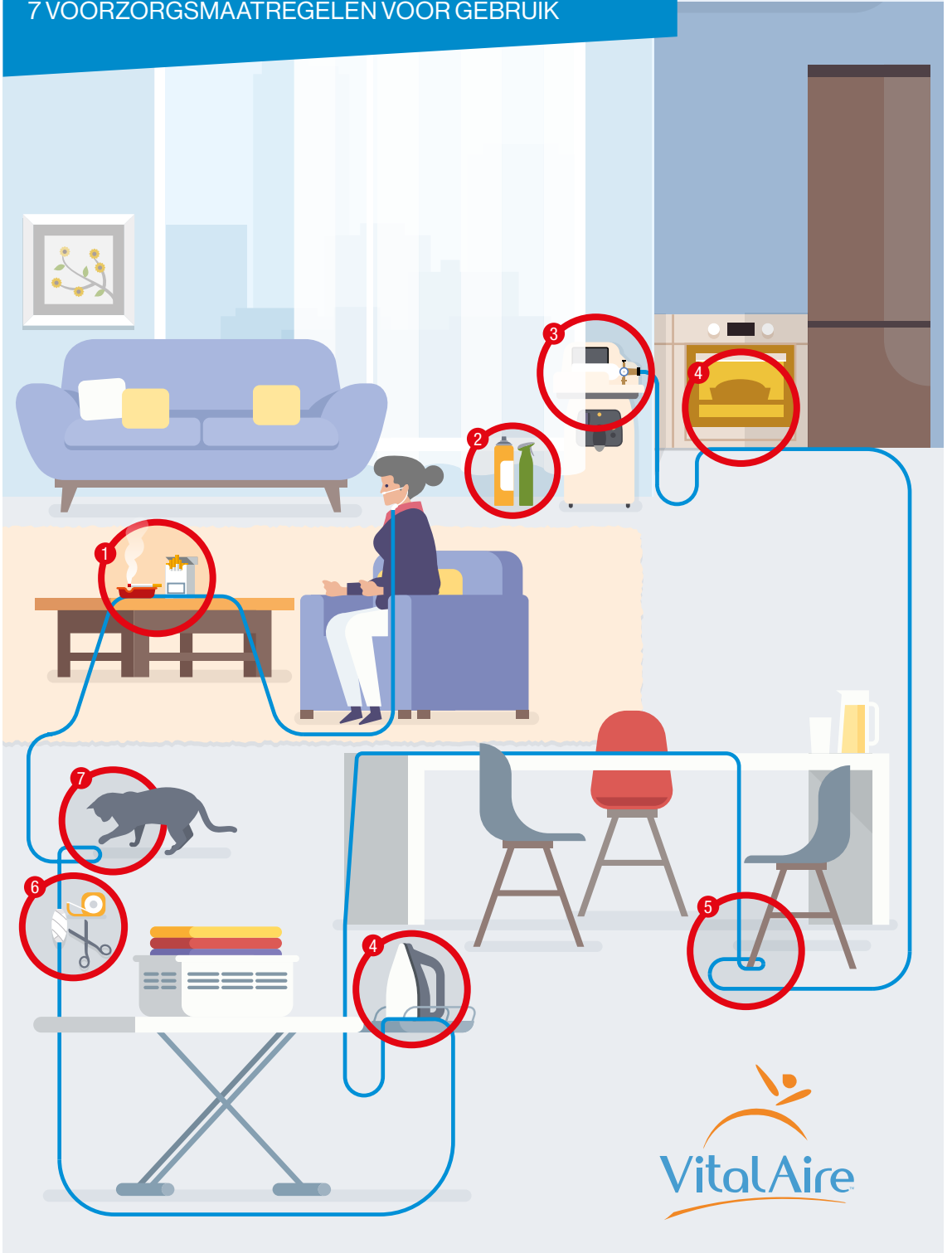

VEILIGHEIDINSTRUCTIES VOOR ZUURSTOF

7 VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK



1

ROOK NOOIT


een sigaret of elektronische sigaret tijdens het gebruik van uw zuurstof of in de ruimte waar de apparatuur is.



2

BRENG GEEN VETTIGE SUBSTANTIES AAN OP UW GEZICHT.

Dat wat wordt gebruikt voor het toedienen van zuurstof mag niet worden ingevet of gesmeerd.

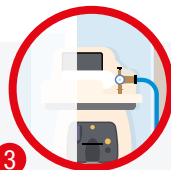

3

PLAATS DE APPARATUUR NIET ACHTER GORDIJNEN,

of in een vochtige ruimte. Bedek het niet. Vergeet niet de ruimte waar de zuurstofbron zich bevindt te ventileren.



4



PLAATS HET APPARAAT NIET IN DE BUURT VAN HITTE, BRAND OF VUUR:

open haard, radiator, oven, strijkijzer, boiler. Houd een afstand van meer dan 3 meter.



5

KNEL DE SLANG NIET

onder een deur of stoelpoten. Niet knopen of buigen.



6

PROBEER NIET TE SLEUTELN

aan de slang, probeer de slang niet te repareren als deze defect is.



7

LAAT UW HUIDS DIER NIET

met de slang spelen