
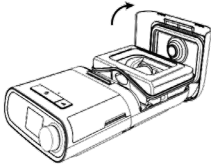


Bevochtiger

Quick Start

1

Klik uw bevochtiger op uw CPAP-toestel
(loskoppelen= grijze op)

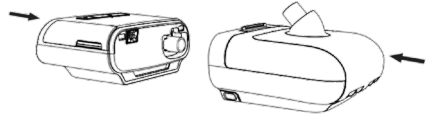


2

Hendeltje bovenaan -> Openen

3

Vullen tot MAX streep

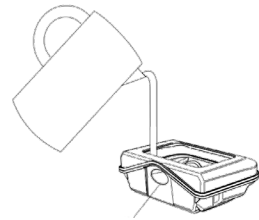

Veranderen vochtigheidsniveau

1

Zet uw toestel aan zodat het blaast

2

U ziet nu rechts onderaan een cijfer met 3 lijntjes van het verdampings
symbool.

3

Cijfer geeft aan op welk bevochtigings niveau hij momenteel staat

4

Draai aan de ronde knop naar het gewenste bevochtigings niveau
(standaard=3)

Type water gebruiken

- Gedestilleerd water (apotheker)

Kalkaanslag

Spoelen in warm water met verdunde azijn. Verdunnen met 1 volume azijn voor 10 volumes water.

Onderhoud bevochtiger

Dagelijks

- Water verversen
- Slang ontkoppelen en laten uitlekken/drogen

Wekelijks

- Reinigen met zeep
- Slang uitspoelen

Tips om condens tegen te gaan

1

Toestel op grond plaatsen

2

Kamer vensters dicht

3

Zachte temperatuur in de slaapkamer

4

Slang onder lakens warmhouden

5

Vochtighedsniveau aanpassen op toestel

