

KORTE GEBRUIKSAANWIJZING

Inhaleren met uw vernevelaar

U dient in ieder geval de gebruiksaanwijzingen van de vernevelaar en de compressor te volgen, hierin vindt u een gedetailleerde beschrijving. Deze wordt bij het apparaat meegeleverd. Bij verlies kunt u contact met ons opnemen voor een nieuw exemplaar via telefoonnummer: 040-2503502



1
U dient voor iedere inhalatie grondig uw handen te wassen.



2a
Monteer het mondstuk of masker.



2b
Als een babymasker wordt gebruikt, dient u een hoekstuk te gebruiken en het masker te positioneren overeenkomstig de houding van de baby.



3
Vernevelaar en compressor verbinden met de aansluit-slang. Compressor aansluiten op het stroomnet.



4
Open het afsluitdeksel.



5
Vul met inhalatieoplossing. Minimum = 2 ml/ maximum = 8 ml. Sluit het deksel.



6
Ga rechtop en ontspannen zitten. Apparaat inschakelen.



7a
Klem het mondstuk tussen de tanden en omsluit het met de lippen.




7b
Houd de vernevelaar rechtop. Het masker moet hermetisch aansluiten.



8
Langzaam en diep inademen door het mondstuk of het masker. Langzaam en volledig weer uitademen. Een veranderd geluid bij de vernevelaar wijst erop dat het medicament is opgebruikt.



9
Apparaat uitschakelen. Vernevelaar van de slang af trekken. Om de slang te drogen het apparaat weer inschakelen.

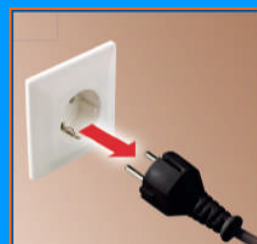

Voor een volledige scheiding van het stroomnet moet u het netsnoer eruit uittrekken.

KORTE GEBRUIKSAANWIJZING

Schoonmaken van uw vernevelaar

U dient in ieder geval de gebruiksaanwijzingen van de vernevelaar en de compressor te volgen, hierin vindt u een gedetailleerde beschrijving. Deze wordt bij het apparaat meegeleverd. Bij verlies kunt u contact met ons opnemen voor een nieuw exemplaar via telefoonnummer: 040-2503502



1 Reiniging

- Vernevelaar demonteren.
- Met warm leidingwater en wat afwasmiddel reinigen.
- Onderdelen grondig onder stromend water naspoeien.



2 Desinfectie

- in een voldoende hoeveelheid kokend water (15 min.)
- in een desinfectieapparaat (b.v. babyflessen apparaat)



3 Drogen

- Onderdelen op een droge, pluisvrije doek leggen.



4 Opbergen

- De onderdelen op een droge, stofvrije plaats bewaren.



5 Vervanging: min 1x per jaar*

- Inlaat compressor luchtfilter, vernevelaar en luchtslang vervangen (PARI Year Packs). Als de onderdelen vervuild of beschadigd zijn, dient het eventueel sneller te worden vervangen.

* minimaal 1x per jaar wordt deze zogenaamde 'vernevelset' vervangen tijdens het jaarlijks onderhoud dat door onze medewerkers wordt uitgevoerd. Indien noodzakelijk kunt u al eerder een nieuwe vernevelset aanvragen op de afdeling Customer Service van VitalAire.

VitalAire BV
Langendijk 27A
5652 AX EINDHOVEN
040-2503502